

Istruzioni per l'uso Lubrificante Satisfyer Men – Warming

I lubrificanti Satisfyer Men

I lubrificanti Satisfyer Men sono prodotti medicinali da applicare sulla pelle. La loro ricetta è priva di oli e di grassi e la validità è dimostrata da materie prime selezionate, processi di produzione controllati e da verifiche approfondite. I lubrificanti sono stati provati con esito positivo in termini di tollerabilità cutanea e delle mucose e presentano una documentata tollerabilità ai preservativi.

Tutti i lubrificanti della serie Satisfyer Men soddisfano i rigidi requisiti della

“Direttiva europea 93 / 42 CEE relativa a prodotti medicinali” e della “legge tedesca sui prodotti medicinali”.

I lubrificanti Satisfyer Men sono a base di acqua. Ciò significa che si possono eliminare con l'acqua facilmente e senza residui e senza lasciare sulla pelle la sensazione di un prodotto appiccicoso. Ideali per l'impiego con tutti i prodotti Satisfyer Men, possono però essere utilizzati anche con tutti gli altri articoli per adulti o nel rapporto sessuale.

Come agiscono i lubrificanti

I lubrificanti facilitano e semplificano l'uso con il tuo Satisfyer Men. Agiscono come un lubrificante che ti permette di penetrare rapidamente nell'involucro morbido e di godere dell'utilizzo con il tuo Toy. Il lubrificante offre una sensazione realistica e garantisce uno scorievolezza intensa. La ricetta incolore e insapore permette un piacere naturale.



Utilizzo dei lubrificanti Satisfyer Men

Il pratico flaconcino consente di dosare facilmente il prodotto. Applica una noce di lubrificante sul pene e un po' di lubrificante sul Toy. Distribuisci uniformemente il lubrificante sul pene eretto introducendolo delicatamente nel masturbatore.

Nel rapporto sessuale applicare analogamente una quantità sufficiente di lubrificanti sulla parte del corpo o sul preservativo applicato sul pene eretto e distribuire con le dita. Si consiglia di lavare bene le mani prima e dopo l'uso. In caso di uso con il preservativo, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso del preservativo.



Come rimuovere i lubrificanti Satisfyer Men

I lubrificanti della serie Satisfyer si possono rimuovere senza residui con acqua, sia dalla pelle, dalle mucose o dal tuo Toy. Per igiene si dovrebbe lavare il Toy prima e dopo ogni utilizzo. Allo scopo il Satisfyer Men Disinfectant Spray è perfetto.

Altre indicazioni per l'utilizzo nel rapporto sessuale Prevenzione delle gravidanze e protezione dalle infezioni

I lubrificanti Satisfyer Men non sono contraccettivi, non contengono sostanze spermicide e non forniscono una protezione contro le infezioni.

Desiderio di maternità

In caso di desiderio di maternità i ginecologi consigliano di usare i lubrificanti con parsimonia o di rinunciarvi del tutto poiché possono rendere più difficile il concepimento.

Ulteriori indicazioni in caso di intolleranze

Se si è alla ricerca di sostanze incompatibili, ad es. sostanze che provocano allergie, prima dell'applicazione leggere l'etichettatura del prodotto alla voce "Ingredienti (INCI)". In caso di irritazioni cutanee, rimuovere il prodotto come descritto ed eventualmente consultare un medico.



Ingredienti

Glicerina, acqua, idrossietilcellulosa, lattato di sodio, benzoato di sodio, allantoina, acido lattico



Produttore

Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germania



CE 0197