

Satisfyer

Brugervejledning Satisfyer – Gentle Warming glidecreme

Satisfyer glidecremerne

Satisfyer glidecremerne er beregnet til anvendelse på huden. Glidecremerne er baseret på en olie- og fedtfri opskrift og udmærker sig ved fremragende glideegenskaber, der holder længe.

Satisfyer glidecremerne er vandbaserede. Derfor kan de uden problemer vaskes af huden med vand uden at huden efterfølgende føles fedtet eller klistret. Glidecremerne er perfekt afstemt efter produkterne i Satisfyer sortimentet, men kan også bruges sammen med alle andre typer erotisk legetøj eller under samleje.

Sådan virker glidecremerne

Glidecremerne gør det enkelt og let at bruge din Satisfyer. Silikonehovedet glider ubesværet og blidt hen over dine mest intime steder, så du uden problemer kan opnå den perfekte placering og derigennem maksimal nydelse. Takket være den farve-, smags- og duftneutrale produktsammensætning er der ingen forstyrrende elementer til at fjerne fokus fra det vigtigste, nemlig din nydelse.



Sådan anvendes Satisfyer glidecremerne

Den praktiske flaske gør det nemt at dosere glidecremen. Kom lidt glidecreme på din klitoris og Satisfyer silikonehovedet. Fordel glidecremen de ønskede steder på kroppen.

Ved samleje skal du ligeledes sørge for at smøre tilstrækkeligt med glidecreme på dine intime steder og/eller kondomet på den erigerede penis. Fordel glidecremen med fingrene. Det anbefales at vaske hænderne grundigt før og efter anvendelse. Inden du anvender glidecremen sammen med kondom skal du læse brugsanvisningen til kondomet.



Sådan anvendes Satisfyer glidecremerne

Glidecremerne fra Satisfyer serien kan uden problemer fjernes fra både hud, slimhinder og legetøj med vand. Af hygiejniske årsager bør du rengøre dit legetøj efter hver brug. Hertil egner vores desinficerende Satisfyer Disinfectant Spray sig perfekt.

Øvrige henvisninger i forbindelse med anvendelse under samleje

Beskyttelse mod graviditet og infektioner

Satisfyer glidecremerne beskytter ikke mod graviditet og indeholder heller ingen sæddræbende virkestoffer. Produkterne beskytter heller ikke mod seksuelt overførte sygdomme.

Ved ønske om graviditet

Hvis du ønsker at blive gravid, bør du ifølge aktuelle gynækologiske anbefalinger kun bruge glidecreme så lidt som muligt eller undgå brugen helt. Glidecreme kan nemlig gøre det sværere for sædcellerne at nå frem til ægget.

Øvrige henvisninger ved overfølsomhed

Hvis du vil tjekke produktindholdet for allergiudløsende ingredienser, skal du kigge under "Ingredients (INCI):" i varedeklareringen. Hvis du oplever hudirritationer, bør du fjerne produktet som beskrevet og eventuelt søge lægehjælp.



Ingredienser

glycerin, vand, hydroxyethylcellulose, natriumbenzoat, kaliumsorbat, citronsyre



EKSKLUSIVT DISTRIBUTUERET GENNEM:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland

