

Gebruiksaanwijzing Satisfyer Men – Cooling glijmiddel

De Satisfyer Men glijmiddelen

De Satisfyer Men glijmiddelen zijn medische producten voor gebruik op de huid. Ze hebben een olie- en vetvrije receptuur en overtuigen met uitgekozen ruwe stoffen, gecontroleerde vervaardigingsprocessen en een omvangrijke controle.

De glijmiddelen zijn positief getest op verdraagzaamheid op huid en slijmvliezen en hebben een aantoonbare condoomverdraagzaamheid.

Alle glijmiddelen van de Satisfyer Men reeks voldoen aan de strenge eisen van de Europese 'Richtlijn 93 / 42 EWG omtrent medische producten' en de Duitse 'Wet op medische producten'.

De Satisfyer Men glijmiddelen zijn op waterbasis. Dit betekent, ze kunnen eenvoudig en zonder restanten met water worden afgewassen en geven geen kleverig gevoel op de huid. Ze zijn ideaal afgestemd op het gebruik met alle Satisfyer Men producten, kunnen echter ook met andere speeltjes of tijdens het geslachtsverkeer worden gebruikt.

Zo werken de glijmiddelen

De glijmiddelen maken de toepassing met je Satisfyer Men eenvoudig en wrijvingsloos. Ze werken als een smeerstof, die het mogelijk maakt om snel in het zachte omhulsel binnen te dringen en van het gebruik met je speeltje te genieten. Het glijmiddel zorgt voor een realistisch gevoel en intensief glijvermogen. Daarbij maakt zijn kleur- en smaakloze receptuur een natuurlijk genot mogelijk.



Toepassing van de Satisfyer Men glijmiddelen

Het praktisch flesje maakt het mogelijk om de dosering laag te houden. Breng een hoeveelheid als een aardnoot op je penis aan en een beetje glijmiddel op je speeltje. Verdeel het glijmiddel gelijkmatig over je stijve penis en glij zachtjes in de masturbator binnen.

Breng tijdens het geslachtsverkeer eventueel voldoende glijmiddel op je penis of op de op de penis afgerolde condoom en op het lichaamsdeel van de partner aan en verdeel met de vingers. Het is aanbevolen om voor en na het gebruik grondig de handen te wassen.

Bij gebruik met condoom de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing van de condoom in acht nemen.



Verwijderen van de Satisfyer Men glijmiddelen

De glijmiddelen van de Satisfyer Men serie kunnen zonder restanten met water worden afgewassen, van de huid, de slijmvliezen of van je speeltje. Om hygiënische redenen moet je je speeltje voor en na elk gebruik reinigen. Daarvoor is de Satisfyer Men Disinfectant Satisfyer uitstekend geschikt.

Overige instructies voor gebruik tijdens het geslachtsverkeer

Zwangerschapspreventie en bescherming tegen infecties

De Satisfyer Men glijmiddelen zijn geen voorbehoedsmiddelen, geen spermacide werkzame stoffen en bieden ook geen bescherming tegen infecties.

Bij kinderwens

Gynaecologen adviseren om glijmiddelen bij kinderwens slechts spaarzaam te gebruiken of omwille van de veiligheid weg te laten aanzien ze de bevruchting kunnen bemoeilijken.

Overige instructies bij onverdraagzaamheden

Bij het zoeken naar onverdraagzaamheden, bijv. allergieopwekkende stoffen, moet men voor gebruik informatie opvragen voor de kenmerk van het product onder 'Ingrediënten (INCI)'. Treden er huidirritaties op, verwijder het product dan zoals beschreven en raadpleeg eventueel een arts.



Inhoudstoffen

Water, glycerine, hydroxyethylcellulose, fenoxylethanol, allantoïne, benzoëzuur, menthol, aroma

Fabrikant



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197