

# Satisfyer

## Руководство по применению Лубрикант Satisfyer – Gentle Light

### Лубриканты Satisfyer

Лубриканты Satisfyer – это продукты для наружного применения на коже. В их составе нет масел и жиров, они привлекают своей долговременной смазывающей способностью.

Лубриканты Satisfyer изготовлены на водной основе. Это значит, что они легко и без остатков смываются водой, не оставляя липкого ощущения на коже. Они идеальны для применения со всеми продуктами Satisfyer, однако могут использоваться также с любыми игрушками или при половом акте.

### Как работают лубриканты

Лубриканты позволяют лучше скользить твоим игрушкам Satisfyer. Силиконовый наконечник нежно скользит по твоим самым интимным местам и позволяет тебе занять самую удобную позу для максимального наслаждения. Благодаря составу без красителей, пищевых и ароматических добавок ты можешь полностью сконцентрироваться на своем удовольствии, не отвлекаясь от самого важного.



### Применение лубрикантов Satisfyer

Практичный флакончик облегчает дозирование. Капни немного лубриканта на свой клитор и капельку на силиконовую насадку Satisfyer. Распредели лубрикант по желаемым частям тела.

Во время полового акта также нанеси и распредели пальцами достаточное количество лубриканта на участок тела или на презерватив, надетый на эрегированный пенис. Рекомендуется перед и после применения тщательно вымыть руки.

При использовании с презервативом непременно соблюдайте указания по использованию презерватива.



### Удаление лубриканта Satisfyer

Лубриканты серии Satisfyer можно легко и без остатка смыть водой с кожи, со слизистой или с твоей игрушки.

По соображениям гигиены после каждого применения тебе следует обязательно очистить игрушку. Для этого идеально подходит дезинфицирующий спрей Satisfyer.

### Прочие указания по использованию при половом акте Предохранение от беременности и защита от инфекции

Лубриканты Satisfyer не являются средством предохранения от беременности, не содержат спермицидов и не служат средством защиты от инфекции.

### В случае желания иметь ребенка

При желании зачатия гинекологи рекомендуют использовать лубрикант в минимальных дозах или вовсе от него отказаться, поскольку это может осложнить процесс зачатия.

### Прочие указания при непереносимости

При выяснении непереносимости, например, веществ, вызывающих аллергическую реакцию, необходимо ознакомиться с веществами, входящими в состав продукта в разделе «Состав (INCI)». При возникновении раздражения кожи, удалите продукт описанным выше способом и, при необходимости, проконсультируйтесь у врача.



### Состав

Вода, глицерин, гидроксизетилцеллюлоза, натрия бензоат, сорбат калия, лимонная кислота



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ ПРАВА

Internetmarketing Bielefeld GmbH,

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany/ Германия



CE