

Instruções de utilização

Satisfyer Men – Lubrificantes neutros

Lubrificantes Satisfyer Men

Os lubrificantes Satisfyer Men são produtos medicinais para utilização na pele. Têm uma fórmula isenta de óleo e gordura e são muito eficazes, com matérias-primas selecionadas, processos de fabrico controlados e um teste exaustivo. Os lubrificantes são testados relativamente à compatibilidade com a pele e as mucosas e têm compatibilidade comprovada com preservativos.

Todos os lubrificantes da gama Satisfyer Men cumprem os rigorosos requisitos da Diretiva Europeia 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos, bem como da Lei de Dispositivos Médicos alemã.

Os lubrificantes Satisfyer Men são à base de água. Isto significa que são fáceis de retirar com água, porque não deixam resíduos e não deixam uma sensação pegajosa na pele. São ideais para utilização com todos os produtos Satisfyer Men, mas também podem ser utilizados com todos os outros Toys ou durante o ato sexual.

A função dos lubrificantes

Os lubrificantes proporcionam um funcionamento simples e perfeito com o teu Satisfyer Men. Funcionam como um lubrificante que te permite penetrar rapidamente a suave camada e desfrutar do prazer do teu Toy. O lubrificante proporciona sensações realistas e um deslizamento intensivo. A fórmula incolor e sem sabor proporciona um prazer natural.



Utilização dos lubrificantes Satisfyer Men

O prático frasco permite-te controlar facilmente a quantidade. Aplica uma quantidade do tamanho de uma noz no pénis e um pouco de lubrificante no teu Toy. Distribui o lubrificante uniformemente pelo pénis ereto e desliza suavemente para dentro do Masturbator.

Durante o ato sexual, aplica também lubrificante suficiente no pénis ou no preservativo enrolado no pénis ereto, bem como nas partes do corpo do(a) companheiro(a) e distribui com os dedos. Recomendamos que laves as mãos muito bem, antes e após a utilização.

Quando utilizares um preservativo, é fundamental seguir as instruções de utilização do mesmo.



Remover os lubrificantes Satisfyer Men

Os lubrificantes da gama Satisfyer Men podem ser retirados com água e não deixam resíduos, quer se trate da pele, das mucosas ou do teu Toy. Por motivos de higiene, deves lavar o teu Toy antes e depois de cada utilização. Para tal, o Desinfetante em Spray Satisfyer Men é o ideal.

Outras indicações para utilização durante o ato sexual

Contraceção e proteção contra infeções

Os lubrificantes Satisfyer Men não são contraceptivos, não contêm espermicidas e não oferecem proteção contra infeções.

Caso pretenda ter filhos

Caso pretenda ter filhos, os ginecologistas recomendam que use os lubrificantes de forma muito moderada ou que deixe de os utilizar completamente, porque podem dificultar a conceção.

Outras informações sobre incompatibilidade

Na determinação de incompatibilidades, como, por exemplo, as substâncias que causam alergias, antes da utilização deve informar-se no rótulo do produto, em "Ingredientes (INCI)". Em caso de irritação da pele, retire o produto da forma descrita e, se necessário, consulte o médico.



Ingredientes

Água, glicerina, etilhidroxietilcelulose, fenoxietanol, alantoína, ácido benzoico

Fabricante



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Alemanha



CE 0197