

Satisfyer

Upute za uporabu Lubrikant Satisfyer – Gentle Classic

Lubrikanti Satisfyer

Lubrikanti Satisfyer su proizvodi za primjenu na koži. Njihova receptura ne sadrži ulja i masti, a odlikuje ih izvanredna kliznost i dugotrajno djelovanje.

Lubrikanti Satisfyer su na bazi vode. To znači da ih sve vrlo jednostavno i bez ikakvih ostataka može oprati vodom, a na koži ne stvaraju nikakav ljepljiv osjećaj. Idealno su usklađeni za korištenje sa svim proizvodima Satisfyer, ali se mogu koristiti i sa svim drugim igračkama ili tijekom spolnog odnosa.

Kako djeluju lubrikanti

Primjena lubrikanata s tvojim proizvodom Satisfyer izuzetno je jednostavna. Silikonski nastavak blago klizi preko tvojih najintimnijih mesta i omogućava ti idealno pozicioniranje za maksimalno uživanje. Zahvaljujući recepturi bez boje, okusa i mirisa ništa neće ometati tvoju pažnju na ono bitno, a ti se možeš u potpunosti koncentrirati na svoje zadovoljavanje.



Primjena lubrikanata Satisfyer

Praktična bočica omogućava ti lagano doziranje. Nakapaj par kapi lubrikanta na svoju dražicu i malo na silikonski nastavak Satisfyer. Rasподijeli lubrikant po željenim mjestima na tijelu.

Prilikom spolnog odnosa isto tako nanijeti dovoljno lubrikanta na dio tijela ili na kondom koji je navučen na ukrućeni penis i raspodijeliti ga prstima. Preporuča se da se prije i posjeće korištenja temeljito operu ruke.

U slučaju korištenja kondoma obvezatno se pridržavati napomena u uputama za korištenje kondoma.



Uklanjanje lubrikanata Satisfyer

Lubrikanti iz serije Satisfyer mogu se oprati vodom bez ikakvih ostataka, neovisno o tome jesu li na koži, sluznici ili na tvojoj igrački. Iz higijenskih razloga svoju igračku trebaš očistiti prije i poslije svake uporabe. Za tu je svrhu idealan dezinfekcijski sprej Satisfyer.

Ostale napomene o korištenju tijekom spolnog odnosa

Sprječavanje trudnoće i zaštita od infekcija

Lubrikanti Satisfyer nisu sredstva za sprječavanje trudnoće, ne sadrže spermicidne tvari i ne pružaju nikakvu zaštitu od infekcija.

Želja za djeecom

Ginekolozи preporučaju da u slučaju da želite zatrudnjeti, lubrikante koristite štedljivo ili da ih zbog sigurnosti u potpunosti izbjegavate, jer oni mogu otežati začeće.

Ostale napomene u slučaju netolerancije

U slučaju pretraživanja glede netolerancije, npr. tvari koje izazivaju alergije, treba se prije primjene upoznati s informacijama navedenim u označavanje proizvoda pod „Ingredients (INCI)“ (sastojci). Ako bi došlo do iritacije kože, molimo vas da uklonite proizvod kako je opisano i da po potrebi konzultirate liječnika.



Sastojci:

Voda, glicerin, hidroksietil celuloza, natrijev benzoat, kalijev sorbat, limunska kiselina



EKSKLUSIVNI DISTRIBUTER:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany

