

Kasutusjuhend Satisfyer Men – Warming libestid

Satisfyer Meni libestid

Satisfyer Meni libestid on tooted, mis on mõeldud nahal kasutamiseks. Nende koostis on õli- ja rasvavaba ning nad veenavad oma valitud toorainete, kontrollitud valmistamisprotsesside ning ulatuslike katsetega. Libestite katsetamine nahal ja limaskestadel on andnud positiivseid tulemusi ning nende sobivus kondoomidega on tõendus põhine.

Kõik Satisfyer Men sarja kuuluvad libestid täidavad rangeid Euroopa

„93/42 EMÜ meditsiinitorude direktiivist“ ja saksa „meditsiinitorude seadusest“ tulenevaid nõudeid.

Satisfyer Meni libestid on veepõhised. See tähendab seda, et neid on hõlbus veega maha pesta ning need ei jäta nahale jääke ega kleepuvat tunnet. Need sobivad ideaalselt kõigi Satisfyer Meni toodetega. Samuti võib neid kasutada teiste leludega või seksuaalvahekorra ajal.

Nii mõjuvad libestid

Libestid muudavad Satisfyer Meni kasutamise lihtsaks ja sujuvaks. Need mõjuvad määrdeainena, mis võimaldab sul kiiresti pehmesse kesta tungida ja oma lelu kasutamist nautida. Määrdeaine annab realistliku tunde ja intensiivse libisemise. Seejuures annab selle värvitu ja maitsetu koostis loomuliku naudingut.



Satisfyer Men libestite kasutamine

Praktilisest pudelikesest on hõlbus doseerida. Kanna maapähklisuurune kogus libestit oma peenisele ja veidi oma lelule.

Hõõru libestit ühtlaselt oma erekteerunud peenisele laiali ja libista sujuvalt masturbaatorisse.

Vahekorra ajal hõõruge piisavalt libestit peenisele või erekteerunud peeniselt mahatõmmatud kondoomile ja partneri kehaosale ning ajage see sõrmedega ühtlaselt laiali. Soovitame enne ja pärast kasutamist käsi põhjalikult pesta.

Kondoomi kasutamisel järgige kindlasti kondoomi kasutusjuhendi juhiseid.



Satisfyer Meni libestite eemaldamine

Satisfyer Men sarja libestid saab veega maha pesta jääke jätmata – kas siis nahalt, limaskestadelt või sinu lelult.

Hügieenilistel põhjustel peaksid oma lelu enne ja pärast iga kasutust puhastama. Selleks sobib ideaalselt Satisfyer Men Disinfectant Spray.

Muud juhised kasutamiseks seksuaalvahekorra ajal

Raseduse ärahoidmine ja nakkuste ennetamine

Satisfyer Meni libestid ei ole rasestumisvastased vahendid, need ei sisalda spermiitsiididel põhinevaid toimeaineid ega paku infektsioonide ennetamist.

Kui on soov last saada

Kui soovite last saada, soovivad günekoloogid libesteid minimaalselt kasutada või ohutuse huvides kasutamisest hoiduda, kuna need võivad viljastumist pärssida.

Muud juhised talumatuse korral

Talumatuse korral, nt allergiat põhjustavad ained, tuleb endale enne kasutamist selgeks teha toote märgistus, mille leiate koostisosade „Ingredients (INCI):“ alt. Nahaärrituste esinemisel eemaldage toode nahalt, nagu kirjeldatud, ja konsulteerige vajadusel arstiga.



Koostisosad

glütseriin, vesi, hüdroksüetüültselluloos, naatriumlaktaat, naatriumbensoaat, allantoiin, piimhape

Tootja



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197