

# SATISFYERMEN

## Brugervejledning Satisfyer Men – Disinfectant Spray

### Satisfyer Men Disinfectant Spray

Satisfyer Men Disinfectant Spray er en specialudviklet desinficeringspray til Satisfyer Men.

Den rengør dit legetøj ekstra skånsomt og grundigt.

Den desinficerende spray består af nøje udvalgte ingredienser. Både fremstillingsprocesserne og det færdige produkt er underlagt omfattende kvalitetskontrol.

### Sådan virker Satisfyer Men Disinfectant Spray

Med Satisfyer Men Disinfectant Spray kan du desinficere og foretage en antibakteriel rengøring af dit legetøj samt mange andre overflader. Produktsammensætningen er ekstra skånsom mod din Satisfyer Men uden at gå på kompromis med renhedsgraden. Således fjerner den desinficerende spray et bredt spektrum af bakterier og vira, som kan udløse eller overføre sygdomme.



### Sådan anvendes Satisfyer Men Disinfectant Spray

Satisfyer Men Disinfectant Spray bruges til rengøring af erotisk legetøj samt alle mindre overflader, der tåler rengøring med en fugtig klud. Spray det ønskede område godt til (ca. 5-6 spraytryk til 100 cm<sup>2</sup>), og lad sprayeren virke i 1-2 minutter. Tør herefter området med en fnugfri klud. Test materialekompatibiliteten ved at spraye lidt af produktet på et ikke synligt sted. Satisfyer Men Disinfectant Spray må ikke bruges på marmor, emalje, messing og andre følsomme overflader. Sprayeren egner sig ikke til desinficering af store områder.

### Øvrige henvisninger


Sikker anvendelse af biocider. Læs mærkningen og produktoplysningerne inden brug. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis du får produktet i øjnene, skal du skylle grundigt med vand og spørge din læge til råds. Hvis du kommer til at indtage produktet, skal du straks søge lægehjælp og vise vedkommende emballagen eller etiketten. Undgå længerevarende hudkontakt. Skyld hænder og handsker / materialer grundigt efter brug. Undgå at indånde spraytågen / aerosolen. Dampene kan gøre dig døsig eller omtåget. Må kun bruges i ventilerede rum. Der må ikke ryges under anvendelsen. Emballagen skal bortskaffes via genbrugspladsen eller miljøbilen og være helt tom for produktrester. Større produktrester skal afleveres på genbrugspladsens afdeling til kemi eller til miljøbilen.



### Indholdsstoffer:

100g opløsning indeholder 0,24g didecyldiemethylammoniumklorid, 0,24g alkylidimethylbenzylammoniumklorid, 0,24g alkylidimethylethylammoniumklorid

### Producent

 Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Tyskland



BAuA Reg.-NR: N-72145