

Bruksanvisning

Satisfyer Men – Warming glidmedel

Satisfyer Men glidmedel

Satisfyer Men glidmedel är produkter som ska användas på huden. De är olje- och fettfria och övertygar med utvalda råvaror, kontrollerade tillverkningsprocesser samt omfattande tester. Glidmedlen är positivt testade när det gäller allergier på huden och slemhinnorna och kan bevisligen användas på kondomer.

Alla glidmedel ur Satisfyer Men-serien uppfyller de stränga kraven enligt den europeiska "direktivet 93 / 42 EWG för medicinska produkter" och den tyska "Medicinproduktlagen".

Satisfyer Men glidmedel är vattenbaserade. Det innebär att de enkelt kan tvättas av med vatten utan att det blir rester kvar och lämnar ingen klabbig känsla på huden. De passar utmärkt att använda med alla Satisfyer Men produkter men kan även användas till andra leksaker eller vid samlag.

Den här effekten har glidmedlen

Glidmedlen gör användningen av din Satisfyer Men enkel och smidig. De verkar som ett smörjmedel som gör att du kan tränga in snabbt i det mjuka höljet och njuta av din leksak. Glidmedlet ger en verklig känsla och en intensiv glidförmåga. Den färg- och smaklösa blandningen ger en naturlig njutning.



Användning av Satisfyer Men glidmedel

Den praktiska flaskan gör det enkelt att dosera. Häll på en klick glidmedel på penis och lite på leksaken. Fördela glidmedlet jämnt på din styva penis och glid in mjukt i masturbatorn, Vid samlag bör du smörja in tillräckligt med glidmedel på kondomen som sitter på den styva penis och på partners kroppsdelen och fördela det med fingrarna. Vi rekommenderar att man tvättar händerna ordentligt före och efter användningen.

Om du använder det med en kondom måste du följa anvisningarna i kondomens bruksanvisning.



Borttagning av Satisfyer Men glidmedlen

Glidmedlen ur Satisfyer Men serien går att tvätta bort helt med vatten, det spelar ingen roll om det här från huden, slemhinnorna eller från din leksak. Av hygieniska skäl bör du rengöra din leksak före och efter varje användning. Satisfyer Men Disinfectant Spray passar utmärkt till detta.

Övriga hänvisningar vid användning vid samlag

Preventivmedel och skydd mot infektioner

Satisfyer Men glidmedel är inga preventivmedel och innehåller inga spermiedödande medel och ger inget infektionsskydd.

Vid önskad graviditet

Gynekologer rekommenderar att man använder glidmedel sparsamt vid önskad graviditet eller inte använder det alls eftersom de kan göra befruktningen svårare.

Övrig information vid allergier

När man letar efter allergier, t. ex. allergiutlösande ämnen bör man informera sig om produkten under "Ingredients (INCI)". Tvätta av produkten enligt beskrivningen och rådfråga eventuellt en läkare om hudirritationer förekommer.



Innehållsämnen

Glycerin, vatten, hydroxyetylcellulosa, natriumlactat, natriumbensoat, allantoin, mjölksyra

Tillverkare



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197