

# SATISFYER**MEN**

## Brugervejledning Satisfyer Men – varmende glidecreme

### Satisfyer Men glidecremerne

Satisfyer Men glidecremerne er beregnet til anvendelse på huden. Produktsammensætningen er både olie- og fedtfri og består af nøje udvalgte ingredienser. Både fremstillingsprocesserne og det færdige produkt er underlagt omfattende kvalitetskontrol. Glidecremerne er blevet testet for hudvenlighed og udløser ingen allergiske reaktioner på hud og slimhinder, ligesom det er sikkert at bruge dem sammen med kondomer.

Alle glidecremerne i Satisfyer Men serien opfylder de strengeste kvalitetskrav som beskrevet i

"Europarådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr" og den tyske "Lov om medicinske produkter".

Satisfyer Men glidecremerne er vandbaserede. Derfor kan de uden problemer vaskes af huden med vand uden at huden efterfølgende føles fedtet eller klistret. Glidecremerne er perfekt afstemt efter produkterne i Satisfyer Men sortimentet, men kan også bruges sammen med alle andre typer erotisk legetøj eller under samleje.

### Sådan virker glidecremerne

Glidecremerne gør det enkelt og let at bruge din Satisfyer Men. Glidecremerne virker som et smøremiddel, der lader dig trænge ubesværet ind i legetøjets bløde indre og fokusere fuldt og helt på nydelsen. Glidecremen sikrer en livagtig fornemmelse i kombination med intensive glideegenskaber. Den farve- og smagsneutrale produktsammensætning sikrer naturlig nydelse.



### Sådan anvendes Satisfyer Men glidecremerne

Den praktiske flaske gør det nemt at dosere glidecremen. Kom en klat glidecreme på størrelse med en jordnød på din penis og lidt på legetøjet. Fordel glidecremen jævnt på din erigerede penis og glid blidt ind i masturbatoren.

Ved samleje skal du ligeledes sørge for at smøre tilstrækkeligt med glidecreme på din penis eller kondomet på den erigerede penis, det samme gælder din partners intime dele. Fordel glidecremen med fingrene. Det anbefales at vaske hænderne grundigt før og efter anvendelse.

Inden du anvender glidecremen sammen med kondom skal du læse brugsanvisningen til kondomet.



### Sådan fjernes Satisfyer Men glidecremerne

Glidecremerne fra Satisfyer Men serien kan uden problemer fjernes fra både hud, slimhinder og legetøj med vand. Af hygiejniske årsager bør du rengøre dit legetøj efter hver brug. Hertil egner vores desinficerende Satisfyer Men Disinfectant Spray sig perfekt.

### Øvrige henvisninger i forbindelse med anvendelse under samleje

#### Beskyttelse mod graviditet og infektioner

Satisfyer glidecremerne beskytter ikke mod graviditet og indeholder heller ingen sæddræbende virkestoffer. Produkterne beskytter heller ikke mod seksuelt overførte sygdomme.

### Ved ønske om graviditet

Hvis du ønsker at blive gravid, bør du ifølge de gynækologiske anbefalinger kun bruge glidecreme i lavt omfang eller endnu bedre undgå brugen helt. Glidecreme kan nemlig gøre det sværere for sædcellerne at nå frem til ægget.

### Øvrige henvisninger ved overfølsomhed

Hvis du vil tjekke produktindholdet for allergiudløsende ingredienser, skal du kigge under "Ingredients (INCI):" i varedeklareringen. Hvis du oplever hudirritationer, bør du fjerne produktet som beskrevet og eventuelt søge lægehjælp.



### Ingredienser

glycerin, vand, hydroxyethylcellulose, natriumlactat, natriumbenzoat, allantoin, mælkesyre



### Producent

Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Tyskland



CE 0197