

Satisfyer

Istruzioni per l'uso Satisfyer – Gentle Classic Lubrificante

I lubrificanti Satisfyer

I lubrificanti Satisfyer sono prodotti da applicare sulla pelle. La loro ricetta è priva di oli e di grassi dimostrata dalle straordinarie proprietà di scorrimento a effetto prolungato.

I lubrificanti Satisfyer sono a base di acqua. Ciò significa che si possono eliminare con l'acqua facilmente e senza residui e senza lasciare sulla pelle la sensazione di un prodotto appiccicoso. Ideali per l'impiego con tutti i prodotti Satisfyer, possono però essere utilizzati anche con tutti gli altri articoli per adulti o nel rapporto sessuale.

Come agiscono i lubrificanti

I lubrificanti facilitano e semplificano l'uso con il tuo Satisfyer. Lo strato di silicone scivola morbidamente sulle zone più intime consente così un posizionamento ideale per il massimo piacere. Grazie alla ricetta insapore e inodore il prodotto non causa distrazione e ti consente di concentrarti completamente sulla tua soddisfazione.



Utilizzo dei lubrificanti Satisfyer

Il pratico flaconcino consente di dosare facilmente il prodotto. Lascia cadere qualche goccia di lubrificante sulla tua clitoride e un poco sull'accessorio in silicone Satisfyer. Distribuisci il lubrificante sulle parti del corpo che desideri.

Nel rapporto sessuale applicare analogamente una quantità sufficiente di lubrificanti sulla parte del corpo o sul preservativo applicato sul pene eretto e distribuire con le dita. Si consiglia di lavare bene le mani prima e dopo l'uso.

In caso di uso con il preservativo, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso del preservativo.



Come rimuovere i lubrificanti Satisfyer

I lubrificanti della serie Satisfyer si possono rimuovere senza residui con acqua, sia dalla pelle, dalle mucose o dal tuo Toy. Per igiene si dovrebbe lavare il Toy prima e dopo ogni utilizzo. Allo scopo il disinfettante spray Satisfyer è perfetto.

Altre indicazioni per l'utilizzo nel rapporto sessuale

Prevenzione delle gravidanze e protezione dalle infezioni

I lubrificanti Satisfyer non sono contraccettivi, non contengono sostanze spermicide e non forniscono una protezione contro le infezioni.

Desiderio di maternità

In caso di desiderio di maternità i ginecologi consigliano di usare i lubrificanti con parsimonia o di rinunciarvi del tutto poiché possono rendere più difficile il concepimento.

Ulteriori indicazioni in caso di intolleranze

Se si è alla ricerca di sostanze incompatibili, ad es. sostanze che provocano allergie, prima dell'applicazione leggere l'etichettatura del prodotto alla voce "Ingredienti (INCI)". In caso di irritazioni cutanee, rimuovere il prodotto come descritto ed eventualmente consultare un medico.



Ingredienti

Acqua, glicerina, idrossietilcellulosa, benzoato di sodio, potassio sorbato, acido citrico



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germania

